



bedal[®] drainpatch

Sterile engangsbrug patch til stabilisering af katetre

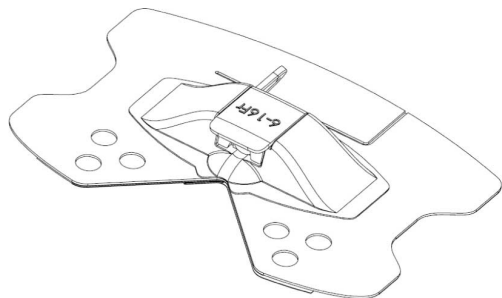

Scan QR-kode for at se instruktionsvideo
videoen viser kun brugsanvisningen delvist

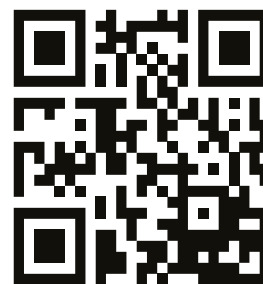

<http://q-r.to/baov35>

Tilsigtet anvendelse: Drainpatch er en kateter stabiliseringsenhed. Den anvendes sammen med et dræningskateter. Drainpatch sikrer et iboende kateter og består af en klæbeforbinding og en klemmedel til at reducere kateterets vandring og udtrækning. Den anvendes sammen med et kateter til specifikke behandlingsformål og necessary for its proper application tilsigtet til behandling eller lindring af sygdom. Drainpatch er en enhed til engangsbrug og sidder på den intakte hud i maks. 7 dage.

Vigtige punkter for anvendelse af Drainpatch stabiliseringsenhed:


- Forbered huden: Barber og vask huden med sæbevand og lad den tørre helt
- Bring Drainpatch i position.
- Placer kateteret i Drainpatch holdedel
- Luk låget, træk papiret af og placer på huden
- Placer en finger under holdedelen og løft for at åbne
- Fjern forbindingsindlæggets klæbemiddel med alkohol
- Bortskaffes efter brug

EN	Brugsanvisninger findes på www.bedal.be	DE	Gebrauchsanweisungen finden Sie auf www.bedal.be	PT	Instruções de uso podem ser encontradas em www.bedal.be
NL	Gebruikersinstructies zijn te vinden op www.bedal.be	IT	Le istruzioni per l'uso possono essere trovate su www.bedal.be	SV	Anvisningar för användning finns på www.bedal.be
FR	Les instructions d'utilisation peuvent être trouvées sur www.bedal.be	ES	Las instrucciones de uso se pueden encontrar en www.bedal.be	DAN	Brugsanvisninger findes på www.bedal.be

CE 1639

En påsætningsteknik (brug hudforberedning til at forberede huden)

- 1-Placer det compatible kateter i den åbne holdedel.
- 2-Luk holdedelen ved at sætte det øverste låg på holdedelen. Der høres et klik når den lukker.
- 3-Træk papiret i venstre og højre side af forbindingsindlægget og pres forbindingen på huden.
- 4-Træk papiret af det lille forbindingsindlæg og placer det over kateteret.
- 5- Pres hele forbindingen på huden for god klæbeevne.

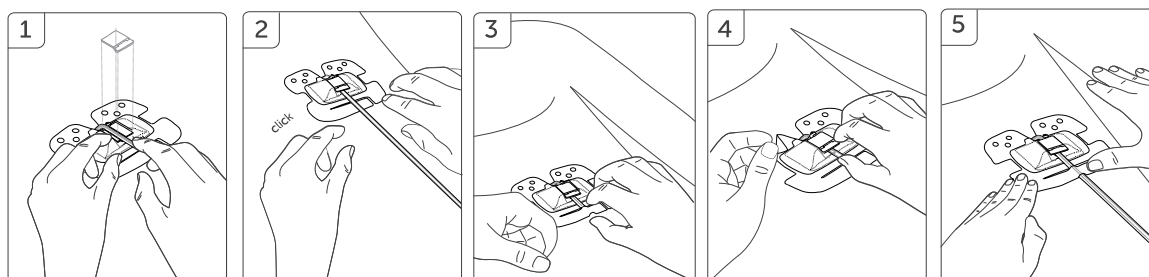

Advarsler og forholdsregler:

- Anvend ikke Drainpatch, hvor der kan forekomme tab af klæbeevne, som ikke-klæbende hud eller forvirret patient
- Overhold retningslinjer for kontrol af infektion under påsætning og fjernelse af Drainpatch, vask hænder før brug.
- Hvis det er nødvendigt, kan Drainpatch-indlægget syes fast til huden.
- Minimer håndtering af kateter under påsætning og fjernelse af Drainpatch.
- Fjern olie og fugt fra målområdet på huden før påsætning.
- Drainpatch og det omgivende område skal kontrolleres jævnligt.
- Drainpatch bør udskiftes mindst hver 7 dag.
- Brug steril teknik til påsætning og fjernelse af Drainpatch.
- Enheden er til engangsbrug. I tilfælde af genbrug, bevarer klæbemidlet ikke sin klæbeevne, hvilket får enheden til at blive løsnet fra huden.
- I tilfælde af tab eller forskel i ydeevne, som manglende klæbeevne på huden, skal enheden fjernes og erstattes.

Alvorlige hændelser skal indberettes til fabrikanten.



bedal

BEDAL NV
Agoralaan A bis-3590 Diepenbeek Belgien
E info@bedal.be
T +32(0)11/28.69.02 - www.bedal.be
Monteret i Polen, EU