


Dispositivo sterile monouso per la stabilizzazione del cateteri

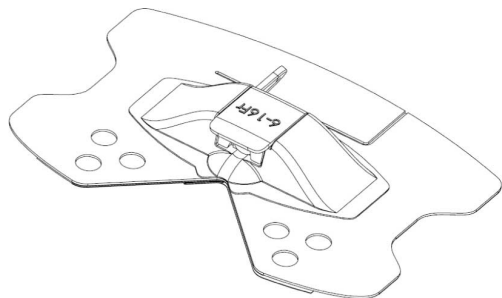

Uso previsto: Il Drainpatch è un dispositivo di stabilizzazione per cateteri. Viene utilizzato in combinazione con un catetere di drenaggio. Il Drainpatch blocca un catetere interno ed è costituito da una medicazione adesiva e da una parte di fissaggio per ridurre il movimento e l'estrazione del catetere. In combinazione con un catetere deve essere usato specificamente a scopo terapeutico ed è necessario per la sua corretta applicazione, destinato a essere utilizzato per il trattamento o per alleviare la malattia. Il Drainpatch è un dispositivo monouso e viene attaccato alla pelle integra per un massimo di 7 giorni.

Punti chiave per l'utilizzo del dispositivo di stabilizzazione Drainpatch:

- Preparare la pelle: radersi e lavarsi con acqua saponata e lasciare asciugare completamente
- Posizionare il Drainpatch.
- Inserire il catetere nella parte a scatto di Drainpatch
- Chiudere il coperchio, staccare la carta e metterlo sulla pelle.
- Per aprire, posizionare il dito sotto la parte a scatto e sollevare per aprire.
- Rimuovere l'adesivo della garza da medicazione con alcool.
- Gettare dopo l'uso

EN	Instructions for use can be found on www.bedal.be	DE	Gebrauchsanweisungen finden Sie auf www.bedal.be	PT	Instruções de uso podem ser encontradas em www.bedal.be
NL	Gebruikersinstructies zijn te vinden op www.bedal.be	IT	Le istruzioni per l'uso si trovano su www.bedal.be	SV	Anvisningar för användning finns på www.bedal.be
FR	Les instructions d'utilisation peuvent être trouvées sur www.bedal.be	ES	Las instrucciones de uso se pueden encontrar en www.bedal.be	DA	Brugsanvisninger findes på www.bedal.be



Scansione del codice QR per guardare il video delle istruzioni. Il video mostra solo parzialmente le istruzioni per l'uso



<http://q-r.to/baov35>

Istruzioni per l'uso:

Il Drainpatch è un dispositivo di stabilizzazione per cateteri compatibili.

Controindicazioni:

Allergie note al nastro o all'adesivo.


Considerazioni sulla sicurezza:

Monouso.

Eliminare se la confezione è danneggiata.

Una tecnica di applicazione (usare le salviette imbevute per preparare la pelle):

- 1 -Inserire il catetere compatibile nella parte a scatto aperta.
- 2 -Chiudere la parte a scatto posizionando il coperchio superiore sulla parte a scatto. Al momento della chiusura si sente un clic.
- 3 - Staccare la carta a sinistra e a destra della garza da medicazione e premere la medicazione sulla pelle.
- 4 - Staccare la carta della garza da medicazione piccola e posizionarla sul catetere.
- 5 - Premere la medicazione completa sulla pelle per assicurarsi una buona aderenza.

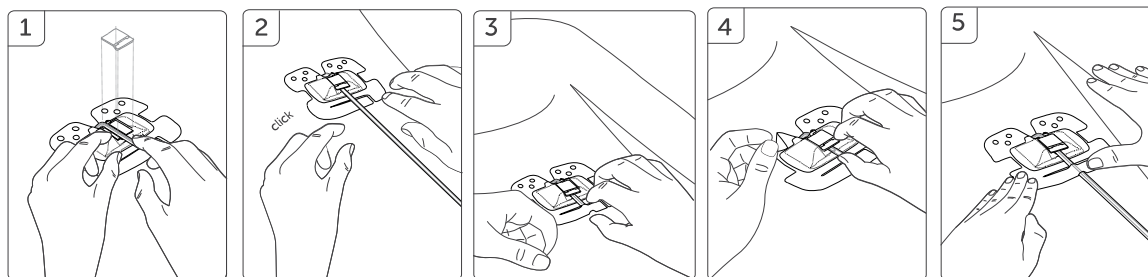

Avvertenze e precauzioni:

- Non utilizzare il Drainpatch dove potrebbe verificarsi una perdita di aderenza, come nel caso di cute che non aderisce o di un paziente confuso.
- Rispettare le linee guida per il controllo delle infezioni durante l'applicazione e la rimozione del Drainpatch, lavarsi le mani prima dell'uso.
- Se lo si ritiene necessario, suturare il tampono di Drainpatch sulla pelle.
- Ridurre al minimo la manipolazione del catetere durante l'applicazione e la rimozione del Drainpatch.
- Rimuovere l'olio e l'idratante dalla pelle prima dell'applicazione.
- Il Drainpatch e l'area circostante devono essere ispezionati regolarmente.
- Il Drainpatch deve essere sostituito almeno ogni 7 giorni.
- Utilizzare la tecnica sterile per l'applicazione e la rimozione del Drainpatch.
- Il dispositivo è monouso. In caso di riutilizzo, l'adesivo non è in grado di garantire le sue prestazioni, provocando l'allentamento del dispositivo dalla pelle.
- In caso di perdita o differenza nelle prestazioni, come l'allentamento dell'aderenza alla pelle, il dispositivo deve essere rimosso e sostituito.

Gli incidenti gravi devono essere segnalati al produttore.

bedal

BEDAL NV
Agoralaan A bis-3590 Diepenbeek Belgio
E info@bedal.be
T +32(0)11/28.69.02 - www.bedal.be
Assemblato in Polonia, UE

