


bedal[®] drainpatch

Dispositivo estéril de utilização única para tabilização de catéteres

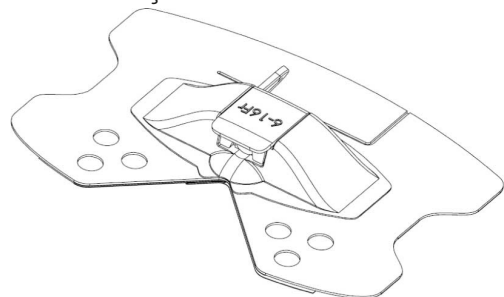

Digitalize o código QR para ver o vídeo de instruções o vídeo apenas apresenta uma parte das instruções de utilização



<http://q-r.to/baov35>

Utilização prevista: O Drainpatch é um dispositivo de estabilização de cateteres. É utilizado conjuntamente com um cateter de drenagem. O Drainpatch permite fixar um cateter permanente e é composto por uma gaze adesiva e por uma peça de grampo para reduzir a deslocação e saída do cateter. Conjuntamente com um cateter, deve ser utilizado especificamente para efeitos terapêuticos e é necessário para a aplicação adequada do cateter no âmbito de tratamentos ou cuidados paliativos. O Drainpatch é um dispositivo de utilização única e deve permanecer aplicado na pele intacta durante um período máximo de 7 dias.

Aspetos mais importantes da utilização do dispositivo de estabilização Drainpatch:

- Prepare a pele: apare os pelos e lave a pele com água com sabão e deixe secar completamente
- Coloque o Drainpatch na posição correta.
- Coloque o cateter na peça de encaixe do Drainpatch
- Feche a tampa, descole o papel e aplique na pele
- Para abrir, coloque o dedo debaixo da peça de encaixe e levante para abrir
- Remova o adesivo faixa tira de gaze com álcool
- Eliminar após a utilização

EN	Instructions for use can be found on www.bedal.be/IFUDP01	DE	Gebrauchsanweisungen finden Sie auf www.bedal.be	PT	Instruções de uso podem ser encontradas em www.bedal.be
NL	Gebruikersinstructies zijn te vinden op www.bedal.be/IFUDP01	IT	Le istruzioni per l'uso possono essere trovate su www.bedal.be	SV	Anvisningar för användning finns på www.bedal.be
FR	Les instructions d'utilisation peuvent être trouvées sur www.bedal.be/IFUDP01	ES	Las instrucciones de uso se pueden encontrar en www.bedal.be	DAN	Brugsanvisninger findes på www.bedal.be



Indicações de utilização:

O Drainpatch é um dispositivo de estabilização para cateteres compatíveis.

Contraindicações:


Alergias conhecidas à fita ou aos adesivos.

Considerações de segurança:

Utilização única.
Eliminar se a embalagem se encontrar danificada.

Uma técnica de aplicação (utilizar uma solução de preparação da pele para preparar a pele)

- 1 - Coloque o cateter compatível na peça de encaixe aberta.
- 2 - Feche a peça de encaixe colocando a tampa superior sobre a peça de encaixe. Ouvirá um clique quando fechar.
- 3 - Descole o papel da esquerda e da direita da faixa de gaze e pressione sobre a pele.
- 4 - Descole o papel da faixa de gaze pequena e coloque-a sobre o cateter.
- 5 - Pressione toda a gaze sobre a pele para garantir uma boa aderência.

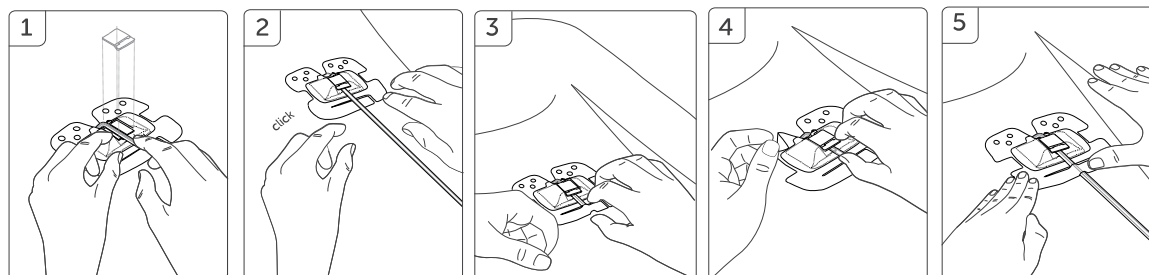

Avisos e precauções:

- Não utilize o Drainpatch se houver a possibilidade de ocorrer uma perda da aderência, como, por exemplo, se a pele não permitir a aderência ou se o paciente se encontrar num condição instável
- Cumpra as diretrizes de controlo de infeções durante a aplicação e remoção do Drainpatch, lave as mãos antes de utilizar.
- Se for necessário, suture a faixa Drainpatch à pele.
- Minimize a manipulação do cateter durante a aplicação e a remoção do Drainpatch.
- Remova o óleo e o hidratante da área da pele em questão antes de aplicar.
- O Drainpatch e a área circundante devem ser inspecionados com frequência.
- O Drainpatch deve ser substituído, no mínimo, a cada 7 dias.
- Utilize a técnica esterilizada para a aplicação e remoção do Drainpatch.
- Este dispositivo é de utilização única. Se for reutilizado, o adesivo não manterá o mesmo nível de desempenho e fará com o que o dispositivo se solte da pele.
- Caso verifique uma redução ou diferença no desempenho, como uma perda da aderência à pele, o dispositivo deve ser removido e substituído.

Os acidentes graves devem ser comunicados ao fabricante.

bedal



BEDAL NV
Agoralaan A bis-3590 Diepenbeek Bélgica
E info@bedal.be
T +32(0)11/28.69.02 - www.bedal.be
Montado na Polónia, UE