


# drainpatch®

Steriles Katheter-Stabilisierungsgerät zur einmaligen Verwendung

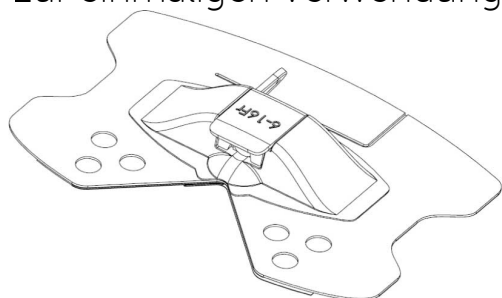

**Verwendungszweck:** Bei dem Drainpatch handelt es sich um ein Gerät zur Katheter-Stabilisierung. Es wird in Verbindung mit einem Drainage-Katheter verwendet. Der Drainpatch sichert einen Dauerkatheter und besteht aus einem selbstklebenden Verband und einem Klemmteil, um eine Bewegung und ein Herausziehen des Katheters zu verringern. Er wird in Verbindung mit einem Katheter speziell zu therapeutischen Zwecken verwendet und für deren ordnungsgemäße Anwendung dient es zur Behandlung oder Linderung von Krankheiten. Bei dem Drainpatch handelt es sich um ein Einweg-Gerät, das für höchstens 7 Tage auf der intakten Haut angebracht wird.

Wichtige Punkte zur Verwendung des Drainpatch-Stabilisierungsgeräts:


- Vorbereitung der Haut: rasieren, mit Seifenwasser waschen und vollständig trocknen lassen.
- Den Drainpatch in Position bringen.
- Den Katheter in den Einrast-Teil des Drainpatch einsetzen.
- Den Deckel schließen, Papier abziehen und auf der Haut anbringen
- Zum Öffnen den Finger unter dem Einrast-Teil positionieren und diesen anheben.
- Den Kleber des Klebekissens mit Alkohol entfernen.
- Nach Gebrauch entsorgen.

EN	Instructions for use can be found on <a href="http://www.bedal.be/IFUDP01">www.bedal.be/IFUDP01</a>	DE	Gebrauchsanweisungen finden Sie auf <a href="http://www.bedal.be/IFUDP01">www.bedal.be/IFUDP01</a>	PT	Instruções de uso podem ser encontradas em <a href="http://www.bedal.be/IFUDP01">www.bedal.be/IFUDP01</a>
NL	Gebbruikersinstructies zijn te vinden op <a href="http://www.bedal.be/IFUDP01">www.bedal.be/IFUDP01</a>	IT	Le istruzioni per l'uso possono essere trovate su <a href="http://www.bedal.be/IFUDP01">www.bedal.be/IFUDP01</a>	SV	Anvisningar för användning finns på <a href="http://www.bedal.be/IFUDP01">www.bedal.be/IFUDP01</a>
FR	Les instructions d'utilisation peuvent être trouvées sur <a href="http://www.bedal.be/IFUDP01">www.bedal.be/IFUDP01</a>	ES	Las instrucciones de uso se pueden encontrar en <a href="http://www.bedal.be/IFUDP01">www.bedal.be/IFUDP01</a>	DAN	Brugsanvisninger findes på <a href="http://www.bedal.be/IFUDP01">www.bedal.be/IFUDP01</a>

CE 1639

Mögliche Anwendungstechnik (Hautpräparation anwenden, um die Haut vorzubereiten):

- 1-Den kompatiblen Katheter an der offenen Einraststelle positionieren.
- 2-Den Einrast-Teil durch Anbringen des oberen Deckels auf dem Einrastteil verschließen. Beim Schließen ist ein Klickgeräusch zu hören.
- 3- Das rechte und das linke Abdeckblatt vom Klebepolster abziehen und das Polster auf der Haut positionieren.
- 4- Das Papier vom kleinen Klebepolster abziehen und über dem Katheter anbringen.
- 5- Das vollständige Klebepolster auf der Haut positionieren, um eine gute Haftung zu gewährleisten.

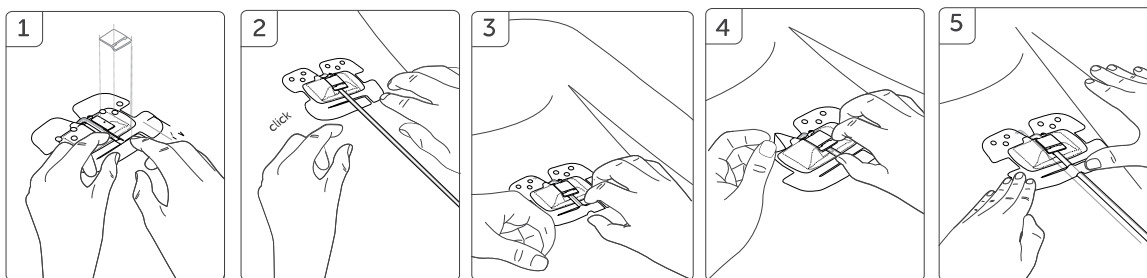

## Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:

- Verwenden Sie den nicht, wenn ein Haftungsverlust auftreten könnte, beispielsweise weil auf der Haut keine Haftung entsteht oder der Patient verwirrt ist.
- Die Leitlinien zur Infektionsbekämpfung müssen während der Anbringung und Entfernung beachtet werden. Die Hände vor Verwendung waschen.
- Wenn dies erforderlich scheint, den Drainpatch an der Haut festnähen.
- Während Anbringung und Entfernung des Drainpatch die Handhabung des Katheters auf ein Minimum reduzieren.
- Vor dem Auftragen Öl und Feuchtigkeitscreme vom vorgesehenen Hautbereich entfernen.
- Der Drainpatch und der umgebende Bereich müssen regelmäßig untersucht werden.
- Der Drainpatch muss spätestens alle 7 Tage ausgetauscht werden.
- Bei Anbringung und Entfernung des Drainpatch steril vorgehen.
- Das Gerät ist ein Einweg-Gerät. Im Falle einer Wiederverwendung hält der Kleber seine Haftung nicht aufrecht, so dass das Gerät sich von der Haut löst.
- Im Falle einer abweichenden Funktion, z. B. Haftungsverlust auf der Haut, muss das Gerät entfernt und ausgetauscht werden.

Schwere Vorfälle müssen dem Hersteller gemeldet werden.



**bedal**

**BEDAL NV**  
Agoralaan A bis-3590 Diepenbeek Belgium  
E [info@bedal.be](mailto:info@bedal.be)  
T +32(0)11/28.69.02 - [www.bedal.be](http://www.bedal.be)  
Montiert in Polen, EU