


drainpatch®

Steriele Fixatiepleister voor katheters
voor eenmalig gebruik

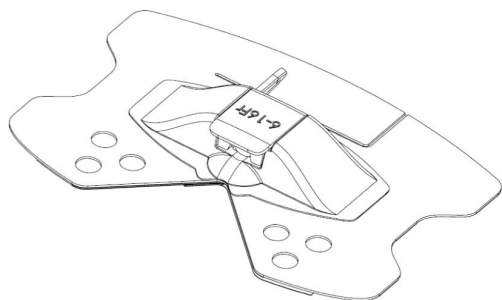

Scan de QR-code om het instructiefilmpje te bekijken. Het filmpje toont maar een deel van de gebruikersinstructies.



<http://q-r.to/baov35>

Gebruiksaanwijzing:

De Drainpatch is een fixatiepleister voor compatibele katheters.

Contra-indicaties:

Bekende allergieën voor verband of kleefmiddel.

Veiligheidsoverwegingen:

Enkel voor eenmalig gebruik.
Weggoien indien de verpakking beschadigd is.

Bedoeld gebruik: De Drainpatch is een fixatiepleister voor katheters. Hij wordt gebruikt in combinatie met een drainagekatheter. De Drainpatch maakt een verblijfskatheter vast en bestaat uit een zelfklevend verband en een klemgedeelte om te voorkomen dat de katheter beweegt en loskomt. In combinatie met een katheter wordt hij specifiek gebruikt voor therapeutische doeleinden en voor een juiste applicatie moet hij worden gebruikt voor de behandeling of de verlichting van een ziekte. De Drainpatch is een pleister voor eenmalig gebruik en wordt gedurende maximaal 7 dagen op de intacte huid vastgemaakt.

Belangrijkste punten voor het gebruik van de fixatiepleister Drainpatch:


- Bereid de huid voor: scheer en was met zeepwater en laat volledig drogen.
- Breng de Drainpatch aan.
- Plaats de katheter in het klikgedeelte van de Drainpatch.
- Sluit het klepje, verwijder het papier en plaats op de huid.
- Om te openen: plaats een vinger onder het klikgedeelte en breng omhoog om te openen.
- Verwijder het kleefmiddel van het verband met alcohol.
- Gooi weg na gebruik.

EN	Instructions for use can be found on www.bedal.be/IFUDP01	DE	Gebrauchsanweisungen finden Sie auf www.bedal.be/IFUDP01	PT	Instruções de uso podem ser encontradas em www.bedal.be/IFUDP01
NL	Gebruikersinstructies zijn te vinden op www.bedal.be/IFUDP01	IT	Le istruzioni per l'uso possono essere trovate su www.bedal.be/IFUDP01	SV	Anvisningar för användning finns på www.bedal.be/IFUDP01
FR	Les instructions d'utilisation peuvent être trouvées sur www.bedal.be/IFUDP01	ES	Las instrucciones de uso se pueden encontrar en www.bedal.be/IFUDP01	DAN	Brugsanvisninger findes på www.bedal.be/IFUDP01

CE 1639

Een applicatietechniek (bereid de huid gepast voor):

- 1-Plaats de compatibele katheter in het open klikgedeelte.
- 2-Sluit het klikgedeelte door de bovenste klep op het klikgedeelte te plaatsen. U hoort een klik bij het sluiten.
- 3- Haal het papier links en rechts weg van het verband en druk het verband op de huid.
- 4- Haal het papier weg van het kleine verband en plaats het over de katheter.
- 5- Druk het volledige verband op de huid om ervoor te zorgen dat het goed vastzit.

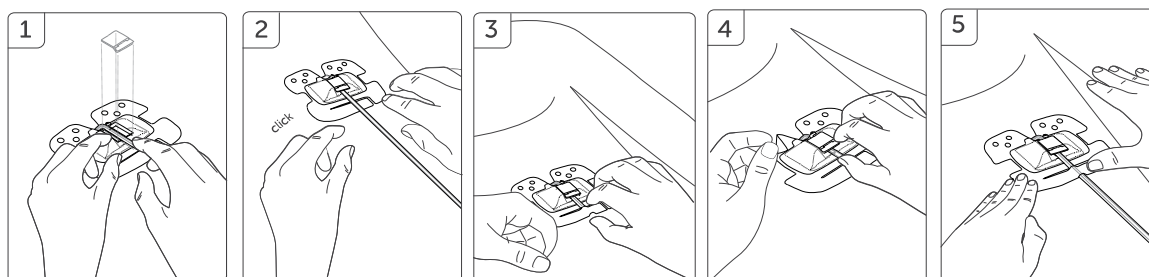

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen:

- Gebruik niet wanneer het verband kan loskomen, zoals bij een huid waar de hechting niet goed lukt of bij een verwarde patiënt.
- Leef de richtlijnen voor infectiebestrijding na tijdens het aanbrengen en verwijderen; was de handen voor het gebruik.
- Hecht het Drainpatch verband vast aan de huid, indien u dit nodig acht.
- Manipuleer de katheter zo weinig mogelijk tijdens het aanbrengen en verwijderen van de Drainpatch.
- Verwijder talg en vochtinbrengende crème van de beoogde huidzone voor het aanbrengen.
- De Drainpatch en de omliggende zone moeten regelmatig worden nagekeken.
- De Drainpatch moet ten minste om de 7 dagen worden vervangen.
- Gebruik een steriele techniek voor het aanbrengen en verwijderen van de Drainpatch.
- De pleister is bedoeld voor eenmalig gebruik. Bij hergebruik blijft het kleefmiddel niet kleven en daardoor komt de pleister los van de huid.
- Als de pleister niet of onvoldoende werkt (bv. hij komt los van de huid), moet hij worden verwijderd en vervangen.

Ernstige incidenten moeten aan de fabrikant worden gemeld.



bedal

BEDAL NV
Agoralaan A bis-3590 Diepenbeek België
E info@bedal.be
T +32(0)11/28.69.02 - www.bedal.be
Geassembleerd in Polen, EU