


# bedal<sup>®</sup> drainpatch

Dispositif stérile de stabilisation de cathéter à usage unique

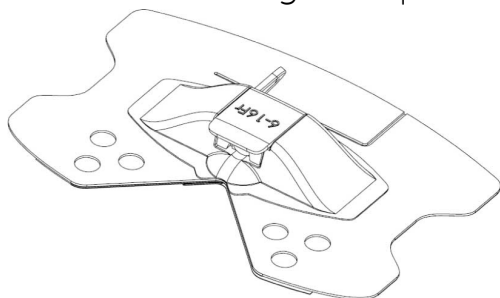

Scanner le code QR pour visionner la vidéo de démonstration  
La vidéo n'illustre qu'une partie des consignes d'utilisation.



<http://q-r.to/baov35>

**Utilisation prévue:** Le pansement Drainpatch est un dispositif de stabilisation de cathéter. Il est utilisé conjointement avec un cathéter de drainage. Le dispositif Drainpatch permet de sécuriser une sonde à demeure et se compose d'un pansement adhésif et d'un support de fixation qui évitent que le cathéter migre ou s'arrache. Lorsqu'il est combiné à un cathéter, le dispositif doit être utilisé spécifiquement à des fins thérapeutiques et nécessairement pour une application adéquate lorsqu'il intervient dans le cadre d'un traitement ou de l'atténuation d'une maladie. Le dispositif Drainpatch est à usage unique et s'applique sur une peau propre pendant une durée maximale de 7 jours.

Mode d'emploi du dispositif de stabilisation de cathéter :


- Préparer la peau : raser et laver à l'eau savonneuse, puis laisser sécher complètement
- Placer le dispositif dans la position souhaitée.
- Insérer le cathéter dans l'encoche prévue à cet effet sur le dispositif
- Rabattre le couvercle, ôter la bande de papier qui recouvre l'adhésif et coller l'ensemble sur la peau
- Pour le retirer, placer un doigt sous l'encoche puis soulever pour ouvrir
- Ôter le pansement adhésif avec de l'alcool
- Jeter après utilisation

EN	Instructions for use can be found on <a href="http://www.bedal.be">www.bedal.be</a>	DE	Gebrauchsanweisungen finden Sie auf <a href="http://www.bedal.be">www.bedal.be</a>	PT	Instruções de uso podem ser encontradas em <a href="http://www.bedal.be">www.bedal.be</a>
NL	Gebruikersinstructies zijn te vinden op <a href="http://www.bedal.be">www.bedal.be</a>	IT	Le istruzioni per l'uso possono essere trovate su <a href="http://www.bedal.be">www.bedal.be</a>	SV	Anvisningar för användning finns på <a href="http://www.bedal.be">www.bedal.be</a>
FR	Les instructions d'utilisation peuvent être trouvées sur <a href="http://www.bedal.be">www.bedal.be</a>	ES	Las instrucciones de uso se pueden encontrar en <a href="http://www.bedal.be">www.bedal.be</a>	DA	Brugsanvisninger findes på <a href="http://www.bedal.be">www.bedal.be</a>



Technique d'application (après avoir préparé la peau) :

- 1 - Placer le cathéter compatible dans l'encoche ouverte.
- 2 - Fermer l'encoche en rabattant le couvercle. Un clic retentit lorsque le dispositif est bien enclenché.
- 3 - Décoller la bande de papier qui recouvre l'adhésif du pansement à droite et à gauche, et appliquer le pansement sur la peau.
- 4 - Décoller la bande de papier qui recouvre l'adhésif du petit pansement et le positionner sur le cathéter.
- 5 - Vérifier que l'ensemble du pansement est bien collé sur la peau.

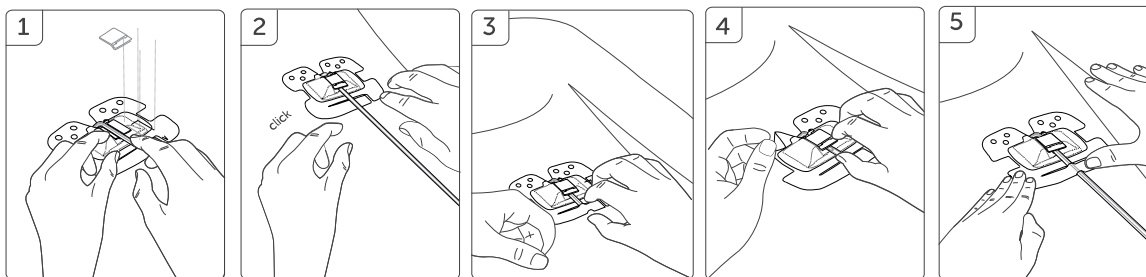

Mises en garde et précautions :

- Ne pas utiliser le dispositif lorsque le pansement adhère mal à la peau, comme sur une peau qui n'adhère pas ou sur un patient en état de confusion.
- Observer les directives de protection contre les infections lors de l'application et du retrait du dispositif et se laver les mains avant utilisation.
- Si nécessaire, suturer le pansement Drainpatch sur la peau.
- Éviter de manipuler le cathéter pendant l'application et le retrait du dispositif Drainpatch.
- Avant l'application, nettoyer la peau de tout résidu gras.
- Le dispositif Drainpatch et la zone à proximité immédiate doivent être régulièrement inspectés.
- Le dispositif Drainpatch doit être remplacé tous les 7 jours minimum.
- Utiliser une technique stérile pour l'application et le retrait du dispositif Drainpatch.
- Le dispositif est à usage unique. En cas de réutilisation, les performances de l'adhésif ne seront pas maintenues et le dispositif n'adhérera pas correctement à la peau.
- En cas de décollement ou de performances inadéquates, comme une perte d'adhérence sur la peau, le dispositif doit être retiré et remplacé.

Tout incident grave doit être signalé au fabricant.



Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé



Ne pas réutiliser; usage unique

LOT Numéro de lot

Fabricant

STERILE R Stérilisé par irradiation

REF Numéro de catalogue



BEDAL NV  
Agoralaan A bis-3590 Diepenbeek Belgique  
E [info@bedal.be](mailto:info@bedal.be)  
T +32(0)11/28.69.02 - [www.bedal.be](http://www.bedal.be)  
Assemblé en Pologne, UE



Date de fabrication



Consulter les instructions d'utilisation

Date limite d'utilisation

Sans latex

30° C  
10° C Limite de température

Attention; mises en garde