


Skanna QR-koden för att se instruktionsvideon
videon visar endast delar av IFU

Steril, engångsplåster för stabilisering av katetrar

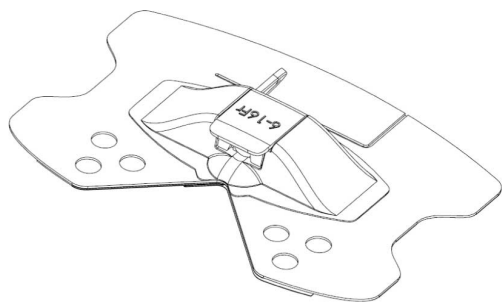

<http://q-r.to/baov35>

Avsedd användning: Drainpatch är en kateterstabiliseringsenhet. Den används i kombination med en dräneringskateter. Drainpatch säkrar en kvarsittande kateter och består av ett limförband och en klämdel som håller katetern på plats. I kombination med en kateter används den specifikt för terapeutiska ändamål och är nödvändig för sin ordinarie tillämpning inom behandling eller lindring av sjukdom. Drainpatch är en enhet för engångsbruk som fästs i huden i högst 7 dagar.

Indikationer för användning:
Drainpatch är en stabiliseringsenhet för kompatibla katetrar.

Kontraindikationer:
Kända allergier för tejp eller lim.

Säkerhetsöverväganden:
Endast engångsbruk.
Kassera om paketet är skadat.

Viktigt om användningen av Drainpatch-stabiliseringsanvändning:


- Förbered huden: raka och rengöra med tvålatten och låt torka helt
- Placera Drainpatch i rätt position.
- Placera katetern i Drainpatch-snäppdel
- Stäng locket, dra loss pappret och placera på huden
- Du öppnar genom att föra ett finger under snäppdelen och lyfta
- Ta bort förbandskuddens lim med alkohol
- Kassera efter användning

EN	Instructions for use can be found on www.bedal.be	DE	Gebrauchsanweisungen finden Sie auf www.bedal.be/IFUDP01	PT	Instruções de uso podem ser encontradas em www.bedal.be/IFUDP01
NL	Gebruikersinstructies zijn te vinden op www.bedal.be/IFUDP01	IT	Le istruzioni per l'uso possono essere trovate su www.bedal.be/IFUDP01	SV	Anvisningar för användning finns på www.bedal.be/IFUDP01
FR	Les instructions d'utilisation peuvent être trouvées sur www.bedal.be/IFUDP01	ES	Las instrucciones de uso se pueden encontrar en www.bedal.be/IFUDP01	DAN	Brugsanvisninger findes på www.bedal.be/IFUDP01



En applikationsteknik (använd skinprep för att förbereda huden)

- 1-Placera den kompatibla katetern i den öppna snäppdelen.
- 2-Stäng snäppdelen genom att placera det övre locket på snäppdelen. Du kan höra ett klickljud.
- 3-Dra loss vänster och höger papper från förbandskudden och tryck förbandet på huden.
- 4-Dra loss pappret från den lilla förbandskudden och placera den på katetern.
- 5- Tryck hela förbandskudden på huden för att säkerställa god vidhäftning.

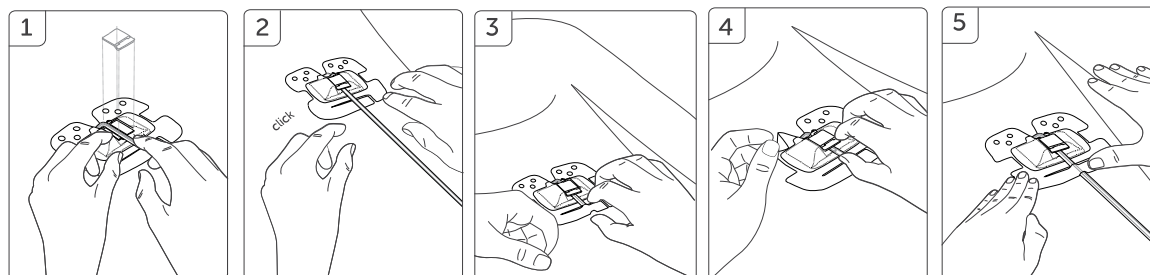

Varningar och försiktighetsåtgärder:

- Använd inte Drainpatch där förlust av vidhäftning kan förekomma, såsom icke vidhäftande hud eller förvirrad patient
- Respektera riktlinjer för infektionskontroll vid applicering och avlägsnande av Drainpatch. Tvätta händerna före användning.
- Om det anses nödvändigt ska du syra fast Drainpatch-kudden i huden
- Minimera katetermanipulationen under applicering och borttagning av Drainpatch
- Avlägsna olja och fuktighetskräm från det målområdet före appliceringen
- Drainpatch och det omgivande området ska rutinmässigt inspekteras
- Drainpatch ska bytas ut minst var 7 dag
- Använd steril teknik för applicering och borttagning av Drainpatch
- Enheten är till för engångsbruk. Vid återanvändning är limmet inte lika starkt, vilket gör så att enheten lossnar från huden.
- Om limmet inte är lika starkt, och t.ex. leder till att enheten lossnar från huden, ska du ta bort och ersätta enheten.

Allvarliga incidenter ska rapporteras till tillverkaren.

bedal